

StarQi Pen Manuale

IT



starQi

Indice

Informazioni generali	3
Recesso	3
Avvertenze sulla funzionalità	4
Avvisi di sicurezza	5
Informazioni generali	6
Dotazione di serie starQi Pen	7
Prima messa in funzione	9
Installazione della app starQi	10
App - Funzionalità	12
Misurazione	15
Indicazione della FCC	17
Indicazione RAEE	18
Conformità RoHS	19
Marchi commerciali e copyright	19
Manutenzione e riparazione	21
Pulizia e cura	21
Condizioni di garanzia	22
Avviso importante	24
Dati tecnici	25

Informazioni generali

Prima della prima messa in funzione della penna starQi occorre leggere, comprendere e attenersi alle istruzioni per l'uso.

Il dispositivo deve essere utilizzato unicamente con gli accessori originali.

Nel caso di eventuali difetti tecnici il dispositivo deve essere reso al produttore, che provvederà a riparare il relativo guasto. Per evenienze di questo genere rivolgersi sempre all'importatore/fornitore generale oppure al venditore del dispositivo.

La penna starQi è un dispositivo elettronico che deve essere utilizzato con la dovuta attenzione.

Recesso

In caso di eventuali danni e/o lesioni in seguito ad azionamento non idoneo o anche in caso di possibili conseguenze dovute all'utilizzo della penna starQi anche nei confronti di terzi, non è possibile avanzare alcuna pretesa di responsabilità civile nei confronti di StarQi GmbH.

La penna starQi deve essere classificata come strumento utile per il benessere fisico. L'utilizzo del dispositivo può coadiuvare nel riequilibrio e nella valutazione energetica; tuttavia, non è e non deve essere inteso come trattamento di qualsiasi natura né come sostituto di una visita medica. StarQi GmbH si dissocia da qualsiasi emissione di diagnosi, dichiarazione di guarigione o promessa di guarigione.

Avvertenze sulla funzionalità

La penna starQi è un dispositivo elettronico. Osservare le relative indicazioni che potrebbero compromettere il funzionamento dei dispositivi elettronici nell'ambiente circostante. Il funzionamento del dispositivo stesso può essere pregiudicato in caso di forti sorgenti di interferenza causate da motori elettrici potenti, scariche statiche e altri dispositivi elettronici. In tali casi potrebbero insorgere problemi, ad esempio nella trasmissione dei dati, fino a compromettere le funzionalità del dispositivo. In alcuni singoli casi ciò può comportare il guasto dell'intero dispositivo.

Qualora ciò avvenga, rimuovere le potenziali sorgenti di interferenza. In seguito, collegare per ca. 5 secondi il dispositivo all'alimentatore in dotazione (5 VCC/1 A) (l'alimentatore deve essere collegato alla rete elettrica). In questo modo viene eseguito il ripristino del dispositivo (durante il ripristino la penna lampeggia brevemente). Una volta terminata l'operazione, il dispositivo può essere di nuovo utilizzato normalmente. Nell'eventualità in cui vengano rilevati inconvenienti che non possano essere eliminati mediante la procedura sopra illustrata, il dispositivo deve essere messo fuori servizio e inviato al Centro di assistenza per una verifica tecnica.

Avvisi di sicurezza

Avvertenza: Non rivolgere mai la punta della penna starQi direttamente verso gli occhi o negli occhi. In alcuni casi i raggi infrarossi emessi dalla punta (diodo IR) possono nuocere agli occhi!

Attenzione: Il dispositivo emette radiazioni non ionizzanti. Tenere presente che queste radiazioni possono condizionare o danneggiare la cute e altri tessuti.

In casi rari, durante o dopo l'uso della penna starQi possono insorgere irritazioni cutanee, che di norma scompaiono dopo 2-3 giorni.

Qualora l'utente presenti qualsiasi alterazione localizzata, senza esclusioni, nei punti di misurazione/regolazione, l'utilizzo del dispositivo deve essere interrotto e deve essere interpellato medico.

Attenersi alle istruzioni per l'uso. Il dispositivo può essere utilizzato unicamente sulle regioni cutanee previste e non deve essere usato in maniera diversa dalla destinazione d'uso.

Utilizzare unicamente accessori originali.

Non gettare il dispositivo su fuoco diretto né esporlo a una temperatura ambiente superiore a 80° C.

La starQi Pen non deve essere smaltita nei comuni rifiuti domestici! Il dispositivo deve essere regolarmente smaltito nei rifiuti speciali. La penna starQi può anche essere resa in qualsiasi momento al nostro Centro di assistenza, cui si può richiedere di provvedere allo smaltimento. La penna starQi è riciclabile al 100%. Provvediamo alla corretta separazione dei rifiuti, di fatto contribuendo alla salvaguardia delle materie prime.

Informazioni generali

Prima di operare con la pennetta starQi leggere attentamente il presente manuale. Le immagini e i grafici costituiscono una rappresentazione simbolica: è possibile riscontrare delle differenze rispetto al dispositivo originale.

Tenere presente che per poter utilizzare la app starQi deve esistere una connessione dati Internet attiva.

Prestare particolare attenzione quando si attiva la connessione dati in aree di roaming (reti esterne o all'estero). Roaming dei dati significa che si ricevono dati sul telefono cellulare o sul tablet, tramite reti di altri gestori.

Quando si stabilisce una connessione dati in roaming, i costi per la trasmissione dei dati possono aumentare.

In base alle impostazioni del telefono cellulare o del tablet, quando si attiva il roaming la connessione dati può essere bloccata. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nel manuale di istruzioni del telefono cellulare o del tablet.

StarQi GmbH non è responsabile degli eventuali costi aggiuntivi da ciò derivanti o derivati, ovvero non può essere in alcun modo essere ritenuta responsabile né dover rispondere di tale evenienza.


Suggerimento starQi: La connessione WLAN è più veloce e solitamente più economica rispetto alla connessione dati mobile. Quando sono disponibili sia una connessione WLAN sia una connessione dati mobile, privilegiare quella WLAN.

Dotazione di serie

- Pennetta starQi
- Istruzioni per l'uso
- Caricabatteria
- Imballaggio

Prima di utilizzare il dispositivo, controllare che tutti i componenti indicati siano presenti e non mostrino difetti. Utilizzare unicamente accessori originali.

starQi Pen

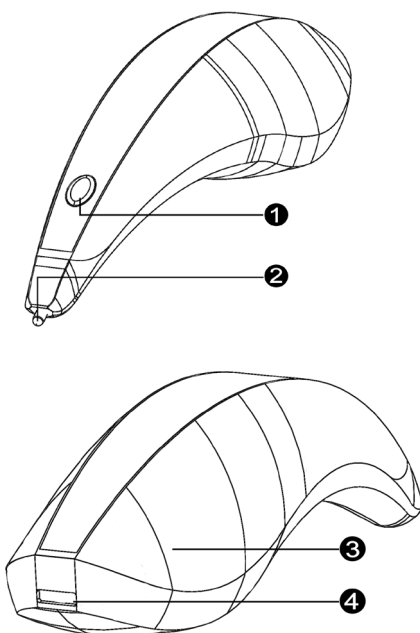

- 1... Tasto di azionamento
- 2... Diodo IR
- 3... Impugnatura con illuminazione
- 4... Presa di alimentazione (5 V CC/1 A)

Colori dell'illuminazione e status della penna:

L'intera penna starQi si illumina:

- turchese/ciano = pronto per il servizio
- giallo (che si attenua/lampeggiante) = in carica
- verde (che si attenua/lampeggiante) = carica completata
- verde (fisso) = pronto per iniziare una misurazione/regolazione premendo il tasto di azionamento.
- rosso (fisso) = misurazione/regolazione in corso. Per arrestare premere il tasto di azionamento.

Destinazione d'uso ed efficacia

La penna starQi è uno dei più moderni stimolatori attivi per punti di Meridiani MTC (secondo le descrizioni della Metodologia Tradizionale Cinese) che agisce tramite uno speciale diodo a raggi infrarossi (IR). Il controllo avviene tramite una App utilizzabile su smartphone o tablet, facile da adoperare.

Misurazione e funzionamento della app

Per eseguire queste operazioni, attraverso impulsi RI a energia definita vengono stimolati specifici punti meridiani. Le quantità di energia impiegate vengono elaborate dal sistema energetico dell'utente, e si giunge a uno stimolo che viene rilevato dall'utente stesso sottoposto al test al raggiungimento di una soglia (sensazione di calore). Attraverso l'interpretazione dei risultati della misurazione mediante la app, possono quindi essere visualizzate la quantità di energia, l'energia eccedente e i blocchi nei singoli meridiani.

Regolazione dell'energia

A seguito delle misurazioni è possibile utilizzare la penna starQi in modalità di regolazione per stimolare, in maniera mirata e definita, aree o singoli punti attivi biologici. In questo modo si ottiene una stimolazione del meridiano, mediante cui è possibile lo scioglimento dei blocchi ed il conseguente riequilibrio energetico.

Prima messa in funzione

Prima della prima messa in funzione caricare completamente la penna starQi (la batteria viene consegnata con carica parziale, e deve essere caricata completamente prima della messa in funzione).

Appena viene collegata al caricabatteria, la penna si accende e ha inizio il caricamento.

Per accelerare l'operazione, spegnere la penna starQi tenendo premuto (per ca. 5 sec.) il tasto di azionamento. Il caricamento veloce viene indicato da una spia lampeggiante di colore giallo.

Appena la penna starQi è carica (il dispositivo lampeggia con colore verde), è possibile scollegarla dal caricatore. La penna è ora operativa. Quando la penna starQi è attiva o in fase di caricamento, il relativo involucro può riscaldarsi.

Dopo il primo caricamento completo, è possibile utilizzare il dispositivo sia mediante l'alimentatore sia a batteria. Lo stato di carica della batteria viene rilevato, analizzato e indicato graficamente dalla app starQi. La app fornisce informazioni sullo stato di carica, permettendo all'utente di capire quando la penna starQi deve essere caricata.

Installazione della app starQi

Una volta caricata completamente, la pennetta starQi è operativa.

Installare sullo smartphone e/o tablet la app starQi, che può essere reperita cercando „starqi“ nel Play Store di Android.

Premere il tasto di azionamento della pennetta starQi; quando è accesa, la pennetta si illumina di color turchese. Per spegnere la pennetta starQi, premere nuovamente il tasto di azionamento per almeno 5 secondi.

A questo punto, avviare la app sullo smartphone o sul tablet.



Successivamente si apre la pagina di login dell'utente.

Se non si è ancora un utente registrato starQi, è necessario effettuare la prima e unica registrazione.

Una volta avviata la app viene visualizzata una schermata di benvenuto, in cui è possibile scegliere se si desidera accedere (login per utenti già registrati) oppure effettuare una nuova registrazione.

Fare clic su „Non ancora registrato? Registrarsi qui“.

Nel nome utente inserire il proprio indirizzo di posta elettronica attivo. La password può essere liberamente scelta dall'utente.

Suggerimento starQi: Si suggerisce di scegliere una password composta da almeno otto caratteri.

Dopo la registrazione, si riceve un messaggio di posta elettronica mediante cui è possibile confermare e contemporaneamente attivare il proprio profilo.

Il messaggio di posta elettronica di conferma può essere ricevuto fino a un'ora dopo la registrazione. Controllare anche la cartella dello spam.

Seguono quindi informazioni personali dell'utente, come: data di nascita, statura, peso e sesso. Al momento della registrazione viene richiesta una serie di dati, che sono necessari per la corretta interpretazione dei risultati delle misurazioni. Si prega di fornire in maniera completa e corretta i dati richiesti. Soltanto in questo modo, infatti, è possibile garantire la correttezza delle interpretazioni, delle regolazioni e dei suggerimenti!

I dati forniti dall'utente vengono trattati il più scrupolosamente possibile, e non vengono trasmessi a terzi!

Nell'improbabile eventualità in cui non si sia ricevuto il messaggio di conferma tramite posta elettronica, è possibile contattarci all'indirizzo: office@starqi.com

Dopo l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica (nome utente), l'utente può accedere mediante la password scelta in precedenza.


Tenere presente che per poter utilizzare la app starQi deve esistere una connessione dati internet attiva.

Una volta eseguito l'accesso viene visualizzata la schermata di benvenuto.

Nella barra di navigazione, nell'estremità inferiore dello schermo, sono disponibili le seguenti opzioni di scelta:



Mediante il tasto Wiki, l'utente può accedere al nostro archivio informazioni con contenuti utili.

Mediante la gestione utente, l'utente può accedere ai propri dati personali. 

App - Funzionalità

La app starQi consiste di 5 diversi livelli di utilizzo, di cui la prima (Basic) è gratuitamente accessibile.

Di seguito le configurazioni presenti per ciascun livello di utilizzo:

Basic: utilizzabile da un unico utente: questionario sullo stato di benessere psicofisico; misurazione; regolazione Basic. Consigli/Suggerimenti: suggerimento starQi, piante selezionate, alimentazione (azione termica). Interpretazione: punteggio a stella, dipolo fuoco/acqua, andamento statistico del punteggio a stella, 5 elementi pieno/vuoto. Wiki (archivio di informazioni): meridiani in generale e una descrizione dettagliata delle piante selezionate.

Le configurazioni seguenti offrono funzionalità talvolta molto più ampie e sono quindi a pagamento:

Lifestyle: fino a 5 utenti: contiene il pacchetto Basic più regolazione Lifestyle; regolazione Beauty. Consigli/Suggerimenti: applicazione di campi magnetici, elenco degli alimenti suddivisi per funzione termica, minerali, proteine, vitamine, oli essenziali che nutrono specifici meridiani o elementi. Risultati: andamento statistico valori misurati, andamento statistico dell'anabolismo/catabolismo, andamento statistico della media energetica.

Correlazioni: chakra, emozioni/psiche, dentatura. Wiki (archivio di informazioni): oli essenziali, elenchi degli alimenti, minerali e vitamine.

Sport: fino a 5 utenti: contiene il pacchetto Health più regolazioni Sport, regolazione Competition, corpo vertebrale, trigger point.

Health: fino a 5 utenti: contiene il pacchetto Lifestyle più regolazioni Health; regolazione a zone; punti neuro linfatici; punti neuro vascolari; zone riflessogene della mano; zone di riflessologia plantare. Consigli/Suggerimenti: sali di Schüssler, dottrina salutistica asiatica; risultati: discostamento tra meridiano destro e sinistro, valori misurati iper/ipofunzione, andamento statistico della glicemia e andamento statistico della pressione (sanguigna/polso) da dati inseriti manualmente e ottenuti tramite misurazione con dispositivi tradizionali. Correlazioni: muscoli, muscolatura, articolazioni, organi Yin, organi Yang, organo sensoriale. Wiki (archivio di informazioni): tabelle valori nutritivi e tabelle valori glicemia da dati inseriti manualmente e ottenuti tramite misurazione con dispositivi tradizionali.

Professional: fino a 500 utenti: contiene il pacchetto Sport più regolazioni Professional; stimolazione riequilibrante energetica del padiglione auricolare. Consigli/Suggerimenti: ad esclusivo utilizzo da parte di personale sanitario autorizzato), Qi-Complex, complessi salutistici a base vegetale. Risultati: diagramma Kiviat. Correlazioni: scatola cranica e nervi cranici.

Nota bene:

I prodotti integratori commercializzati da StarQi GmbH e suggeriti nelle App, possono essere perfettamente sostituiti dagli elementi nutrizionali elencati nella sezione "Ingredienti", peraltro facilmente reperibili in commercio.


I consigli e i suggerimenti presenti nella schermata “Ingredienti” delle App, risultano dalla correlazione con i meridiani in disequilibrio e sono riferiti esclusivamente agli aspetti energetico-olistici; non sono riferibili a diagnosi mediche né sono predittivi. Non costituiscono, pertanto, alcuna prescrizione e in nessun caso possono sostituire un trattamento medico-farmacologico.

I suggerimenti alimentari riportati nelle App non sono da intendersi come consigli nutrizionali, ma hanno la funzione di evidenziare soltanto un corretto bilancio termico come indicato dalla metodologia tradizionale cinese (per gli aspetti energetici). Nel caso fosse consigliato seguire una specifica dieta alimentare consultare un esperto nutrizionista o medico competente.

I suggerimenti relativi alla magnetoterapia riportati nelle App sono intesi in funzione di una esclusiva stimolazione energetica riferita ai meridiani in disequilibrio. Nel caso fosse suggerito un uso considerato terapeutico, consultare un operatore qualificato e/o il produttore del dispositivo a campi magnetici.

Mediante il tasto “Wiki” l’utente può accedere al nostro archivio di informazioni con contenuti utili.

Mediante la “Gestione utente”, l’utente può accedere ai propri dati personali.

Il pulsante “Informazioni”  è disponibile in quasi tutte le pagine della app. Mediante questo pulsante l’utente ottiene utili informazioni sulla schermata attualmente visualizzata.

Nel menu principale compaiono la versione della app e lo stato di carica della penna StarQi.

La app ricorda tempestivamente all'utente quando occorre caricare la penna. Nel caso in cui compaia la finestra di dialogo relativa allo stato della batteria, la penna ha ancora a disposizione circa oltre il 30% di capacità della batteria. Quando lo stato della batteria raggiunge il livello critico, è ancora disponibile circa il 10% di capacità della batteria: la penna starQi deve essere caricata. Quando la capacità della batteria scende sotto il 10%, non è più possibile avviare misurazioni né regolazioni. Quando viene collegato il caricabatteria, la penna starQi può essere subito utilizzata senza interruzioni come di consueto.

Misurazione

Nel caso in cui il bluetooth dello smartphone o del tablet sia disattivato, viene visualizzata la segnalazione che l'app starQi desidera attivare il bluetooth. Confermare la segnalazione premendo „Sì“.

Una volta attivato il bluetooth è possibile avviare la ricerca di una penna starQi. Accertarsi che la penna starQi sia accesa. Quindi, premere il pulsante „Cerca starQi Pen“. Selezionare la penna desiderata. Il dispositivo viene automaticamente collegato non appena immesso e confermato il codice di accesso per l'accoppiamento del bluetooth: 0000 (quattro volte zero).

Appena la penna starQi viene collegata alla app, la misurazione inizia immediatamente. L'illuminazione della penna diventa di colore verde. Durante la misurazione seguire le istruzioni della app.

Viene visualizzato il primo punto di misurazione. Poggiare delicatamente (senza esercitare pressione) la punta della penna starQi sul punto indicato, e premere il tasto di azionamento sul dispositivo. Non appena nel punto di misurazione si avverte una certa sensazione di calore, terminare la misurazione premendo nuovamente il tasto di azionamento. Nel caso in cui l'utente non avverta alcuna reazione e non termini la misurazione, questa viene arrestata automaticamente dopo un breve lasso di tempo. Ripetere questa procedura per tutti i punti indicati.

Suggerimento starQi: Per avviare la misurazione di un punto premere brevemente una volta il tasto di azionamento della penna starQi; il tasto non deve essere tenuto continuamente premuto. Qualora il tasto di azionamento venga premuto per più di 5 secondi, la penna starQi si spegne.

La descrizione di tutte le altre funzionalità, quali la regolazione, le correlazioni, le statistiche, le raccomandazioni relative ai prodotti, ecc., è disponibile sul nostro Wiki oppure nella app.

Indicazione della FCC

Il presente dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle condizioni indicate di seguito:

1. Il presente dispositivo non deve provocare interferenze.
2. Il presente dispositivo deve essere in grado di assorbire tutte le interferenze, anche quelle che ne compromettono il funzionamento.

Indicazione della FCC (Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti):

Il presente dispositivo è stato collaudato ed è conforme, secondo la Sezione 15 delle norme FCC, ai limiti imposti per i dispositivi digitali di classe B. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze negli spazi abitati. Il presente dispositivo genera e utilizza, e può irradiare, energia ad alta frequenza. Quando il dispositivo non viene utilizzato conformemente al manuale di istruzioni, possono verificarsi interferenze nella trasmissione dell'alta frequenza. Non è tuttavia possibile escludere che in determinati dispositivi possano comunque comparire interferenze. Quando il presente dispositivo provoca interferenze nella ricezione di radio e televisione, che è possibile stabilire spegnendo e accendendo nuovamente la pennetta, si può cercare di risolvere il problema adottando una o più delle misure seguenti:

Orientare nuovamente l'antenna di ricezione oppure posizionarla altrove.

Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.

Collegare il dispositivo e il ricevitore a due circuiti elettrici diversi.

Rivolgersi a un rivenditore specializzato oppure a un tecnico radio-televisivo esperto.

Il dispositivo può essere cambiato o modificato unicamente se l'utente viene esplicitamente invitato a farlo dietro indicazione del manuale d'uso. In caso contrario, all'utente potrebbe essere revocata l'omologazione del dispositivo.

Tutti i documenti di certificazione ufficiali vengono forniti su richiesta.

Indicazione RAEE

La direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), entrata in vigore sotto forma di legge europea il 13 febbraio 2003, ha determinato un'ampia trasformazione nello smaltimento dei dispositivi elettrici dismessi. La finalità specifica di tale direttiva è evitare che i rottami elettrici (RAEE) si riducano a rifiuti, promuovendo contemporaneamente riutilizzo, riciclaggio e processi simili. Il logo RAEE (mostrato a sinistra), apposto sul prodotto e sull'imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito nei comuni rifiuti domestici. L'utente è tenuto a consegnare tutti i dispositivi elettrici ed elettronici dismessi presso i rispettivi punti di raccolta. La raccolta differenziata e il recupero intelligente dei rottami elettrici contribuiscono a ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. Inoltre, il recupero dei rottami elettrici favorisce la tutela ambientale e, quindi, anche la salute degli esseri umani. Ulteriori informazioni in merito allo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici, al riciclaggio e ai punti di raccolta sono disponibili presso le autorità locali, le imprese di smaltimento, le rivendite specializzate e il fabbricante del dispositivo.

Conformità RoHS

Il presente prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003 riguardante le restrizioni dell'impiego di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e relative variazioni.

Marchi commerciali e copyright

© StarQi GmbH. Tutti i diritti riservati.

Il presente manuale è tutelato dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta ovvero trasmessa in qualsivoglia forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, registrazioni e archiviazioni in un sistema di memoria o di recupero delle informazioni, senza la previa autorizzazione scritta di StarQi GmbH.

Bluetooth e il logo bluetooth sono marchi di Bluetooth SIG, Inc.

Java™ e tutti i simboli basati su Java sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Oracle Corporation e/o delle sue società controllate negli U.S.A. o in altri paesi. © Oracle Corporation

iPhone e iPad sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc. negli USA e in altri paesi. © Apple Inc.

Android OS è un marchio registrato di Google Inc. © Google Inc

QR Code è un marchio registrato di Denso Wave Inc. © Denso Wave Inc.

Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi qui citati sono marchi commerciali registrati e non, oppure marchi di servizi di proprietà dei rispettivi proprietari.

StarQi GmbH declina ogni responsabilità per errori e omissioni tecnici o di redazione nel presente documento, nonché per danni accidentali o consequenziali che possano essere ricondotti all'utilizzo di questo materiale. Le informazioni vengono fornite „allo stato attuale“. La StarQi GmbH, tuttavia, si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso, assieme al contenuto del presente documento.

Non è consentito riprodurre, trasmettere o tradurre in un'altra lingua il presente documento, interamente o parzialmente, in qualsivoglia forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, registrazioni sonore e archiviazioni in sistemi consultabili, senza la previa autorizzazione scritta di StarQi GmbH.

Manutenzione e riparazione

La penna starQi è stata sviluppata in modo da non richiedere manutenzione. In caso di riduzione della capacità della batteria, su richiesta dell'utente il nostro Centro assistenza può sostituire la batteria.

Le riparazioni e altre variazioni relative al dispositivo o agli accessori devono essere effettuate esclusivamente dal produttore. Per tali operazioni o in caso di dubbi rivolgersi direttamente all'importatore/fornitore generale. Prima di ogni utilizzo verificare l'eventuale presenza di danni esterni nel sistema. In caso di danneggiamenti delle linee elettriche o dell'involucro, occorre interrompere immediatamente l'uso ed eventualmente scollegare il dispositivo dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Il dispositivo e gli accessori devono essere messi fuori servizio finché il danno non è stato riparato dal Centro assistenza.

Consegnare il presente prodotto a terzi soltanto unitamente alle istruzioni originali per l'uso.

Pulizia e cura

In caso di necessità, la penna starQi e i relativi accessori possono essere puliti con un panno umido e normali detergenti domestici oppure disinfettanti delicati per superfici. Questo dispositivo non necessita di ulteriori procedure di disinfezione e di pulizia.

Non utilizzare mai solventi organici né detergenti domestici corrosivi. Queste sostanze, infatti, possono danneggiare la penna starQi.

Condizioni di garanzia

La penna starQi è stata sviluppata in Austria, dove viene accessoriata, fabbricata, assemblata e collaudata. La fabbricazione avviene conformemente alla gestione della qualità secondo la norma ISO9001.

Ci scusiamo sentitamente qualora dovessero comunque verificarsi reclami. L'utente è pregato di mettersi immediatamente in contatto con noi. Garantiamo sin d'ora di fare tutto il possibile per risolvere il più rapidamente possibile i motivi alla base del reclamo e soddisfare il cliente.

La penna starQi è coperta da una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, unicamente se utilizzata correttamente.

La garanzia comprende i costi per l'eventuale eliminazione dei guasti relativi al materiale e per le ore di lavoro impiegate. I costi ed i rischi relativi al trasporto rimangono di competenza del committente.

I dispositivi da esposizione sono coperti da garanzia per un periodo massimo di 12 mesi. Il periodo di copertura della garanzia per batterie e caricabatteria è di 6 mesi; la sostituzione deve avere luogo per mezzo della nostra sede di assistenza.

La garanzia viene fornita come segue: StarQi GmbH stabilisce se sostituire oppure riparare i componenti che hanno subito un guasto a causa di errori comprovati di fabbricazione o dei materiali. In questo caso non è previsto un prolungamento del periodo di garanzia. I componenti sostituiti diventano di proprietà di StarQi GmbH. La presente garanzia non giustifica ulteriori rivendicazioni, nello specifico relative a conversione, deprezzamento o risarcimento.

La garanzia non copre quanto segue:

- Danni attribuibili a condizioni locali, quali errori di installazione, incendio, fulmine, ecc.
- Conseguenze di interventi di terzi (es. apertura del dispositivo).
- Dispositivi in cui il numero di fabbricazione/di serie è stato rimosso, rovinato oppure manipolato.
- Dispositivi in cui gli indicatori di umidità e/o rottura sono stati manipolati oppure rimossi.
- Tutti i tipi di danni dovuti a rottura oppure a caduta.
- Conseguenze della mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, e danni dovuti a uso negligente, non idoneo oppure improprio.
- Conseguenze di usura, parti di usura, materiali di consumo e difetti che incidono in maniera solo poco significativa sul valore o sull'idoneità all'impiego.
- Batterie, compresi i danni conseguenti all'utilizzo di batterie o accumulatori difettosi oppure obsoleti.
- Lampadine e LED; in questo caso ha luogo la sostituzione gratuita solamente entro i primi 90 giorni; la sostituzione deve avere luogo per mezzo della nostra sede dell'assistenza.
- Dispositivi che sono stati impiegati per uso commerciale.
- Danni dovuti a condizioni di funzionamento anomale, come fumo di tabacco, oli commestibili evaporati, polvere e, in particolare, acqua e altri liquidi.
- Danni dovuti a reso in un imballaggio non idoneo al trasporto.

Ogni invio destinato a StarQi GmbH relativo alla garanzia o all'assistenza deve (anche nell'interesse del cliente) essere dimostrabile.

Tutti i dispositivi inviatici SENZA garanzia/tagliando per l'assistenza interamente compilati non possono essere da noi elaborati e assegnati.

In caso di reclami, riparazioni, o casistiche contemplate dalla garanzia, rivolgersi direttamente al nostro Centro assistenza.

Il periodo di copertura della garanzia si riferisce esclusivamente al primo acquirente e non è trasferibile. Per comprovare le richieste di garanzia occorre la prova di acquisto interamente compilata con il numero di fabbricazione/di serie.

La presente garanzia sussiste in via integrativa e non pregiudica in alcun modo i diritti garantiti a norma di legge e altri diritti degli utenti finali.

Avviso importante

Le informazioni derivanti dalle valutazioni e regolazioni energetiche condotte tramite la pennetta StarQi, nonché gli eventuali consigli/suggerimenti messi in risalto nei programmi del software, sono riferiti esclusivamente agli aspetti energetico-olistici; in nessun caso possono sostituire un trattamento medico-farmacologico; anche nel caso di interventi rivolti a persone con patologie riconosciute, il trattamento energetico condotto con la pennetta StarQi lavora esclusivamente con la parte SANA della persona malata, al fine di promuovere il miglioramento energetico globale e dello stile di vita del soggetto trattato.

Dati tecnici

Tipo:

starQi Pen

Produttore:

Starqi GmbH, Othmar-Jaindl Weg 2, A-9523 Villach

Centro assistenza:

Starqi GmbH, Othmar-Jaindl Weg 2, A-9523 Villach

Alimentazione elettrica esterna:

5 V CC / 1000 mA

Alimentazione elettrica interna:

Cella a ioni di litio 3,7 V CC 2600 mAh

Corrente assorbita:

Idle (inattivo): 50 mA; attivo: max. 350 mA; modalità di carica: 1000 mA

Intervallo di temperatura:

A riposo: tra -20° C e +50° C 0...95% u.r.

In esercizio: tra +0° C e +50° C 0...85% u.r.

Dimensioni (BxHxL):

170x40x50 (mm)

Peso senza accessori:

110 g

Involucro:

Base: SAN

Componenti molli: TPE

Nome del dispositivo bluetooth:

starQi Pen + numero di serie

Codice di accesso per l'accoppiamento bluetooth:

0000 (quattro volte zero)

Lunghezza d'onda irradiata:

950 nm

Emissione luminosa irradiata:

<=1 mW

Certificazioni del prodotto:

CE, FCC (FCCID: POOWML-C46)

Sono possibili modifiche tecniche e dimensionali, nonché errori di composizione e di stampa.

StarQi GmbH declina ogni responsabilità per errori e omissioni tecniche o di redazione nel presente documento, nonché per danni accidentali o consequenziali che possano essere ricondotti all'utilizzo di questo materiale. Le informazioni vengono fornite „allo stato attuale“. La StarQi GmbH, tuttavia, si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso, assieme al contenuto del presente documento.

Non è consentito riprodurre, trasmettere o tradurre in un'altra lingua il presente documento, interamente o parzialmente, in qualsivoglia forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, registrazioni sonore e archiviazioni in sistemi consultabili, senza la previa autorizzazione scritta di StarQi GmbH.

IT Versione 1.02; © StarQi GmbH – 2014